

# AED使用上の注意

パッドは素肌にしっかりと貼ってください。

胸部に薬剤が貼付されている場合は、薬剤をはがしてください。  
残った薬剤も拭き取ってください。

体が水に濡れている場合は、タオルなどで水分を拭き取ってください。

鎖骨の下が膨らんでいる場合は、ペースメーカーが入っている可能性があります。  
膨らみから3cm以上離してパッドを貼ってください。

ネックレスをしている場合は、外してください。  
外せないときは、パッドの下に入らないようにネックレスをずらしてください。


呼吸を再開しても、再び電気ショックが必要になる可能性があるため、パッドは貼ったまま、  
フタは開けたままで救急隊の到着を待ってください。

心電図の解析中、放電時には体にさわらないでください。

## レスキューキット

救命の際にあると便利な道具がそろっています

- 蘇生用マウスピース (RESACO-R)
- ニトリルグローブ
- タオル
- ハサミ
- ペーパータオル
- カミソリ

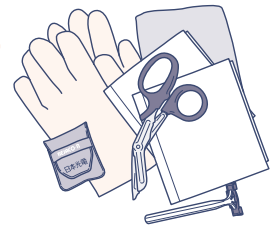


## 小児（1歳以上8歳未満）へ使用する場合



**小児用パッド**  
エネルギーを減衰させる  
機能があります



電極パッドを  
取り外し、小児用  
パッドを接続します。

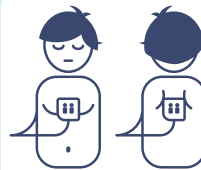

パッドが重ならないように  
前胸部と背中に貼ります。



パッドは、右上胸部と心臓の  
左下に貼ることもできます。